

## BelevenisTafel Ely Kantelbaar

### Aanzetten

---

Er zijn twee mogelijkheden om de tafel aan te zetten:

A. Steek de stekker in het stopcontact. (De tafel gaat aan en het menu wordt geladen)

B. Gebruik de powerknop (on/off) die u onderaan het scherm vindt. (Dit gebruikt u als de stekker in het stopcontact blijft)



### Afsluiten

---

Het is belangrijk dat eerst de software afgesloten wordt. Druk in het hoofdmenu op het scherm linksonder op de afsluitknop.

Er verschijnt een code scherm. Gebruik de code **0000** om de programma's af te sluiten.

Na enige tijd wordt het scherm zwart. U kunt nu de stekker verwijderen of de powerknop (on/off) gebruiken.

**Let op: zet nooit de tafel uit zonder eerst de software af te sluiten!**

### Liftbediening

---

Aan de zijkant van de Belevenis Tafel zit een afstandsbediening, deze kunt u gebruiken om de BelevenisTafel in hoogte en kijkhoek te verstellen.

**Let op: dat er bij het bedienen geen personen of objecten in de buurt van de BelevenisTafel zijn.**



### Geluid aanpassen

---

U kunt elk menu een eigen volume geven. Kies een menu en klik **rechts onderaan op de volumeknop**.

U kunt hierna het volume aanpassen. Herhaal dit eventueel bij andere menu's



## Diverse aansluitingen



Met de HDMI-aansluiting of VGA-aansluiting kunt u een tweede scherm koppelen aan het scherm, zodat er ook op dat tweede scherm meegekeken kan worden.

Met de USB-poorten kunt u gebruik maken van de applicatie "Foto's van USB" in het TipTileMenu.

Met de UTP-aansluiting kunt u een internetkabel verbinden met de BelevenisTafel. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld geen of een slechte wifi-verbinding heeft.

## Het menu verlaten

Druk op het **Onwijs logo** en vul de code **3255** in. U komt nu in het scherm van de BelevenisTafel Assistent. Hier kunt u:

- Terug naar het menu
- Teamviewer starten
- Wi-Fi settings instellen
- Een internetbrowser openen
- Een schermtoetsenbord openen
- Windows verkenner openen
- Naar het bureaublad (kruisje)

## Lift resetten

Als u in de display van de afstandsbediening E1-res ziet staan, dan moet de lift gereset worden. Gebruik de omlaag knop om de tafel in de laagste stand te zetten.

Druk hierna de knop nogmaals in en houd deze ingedrukt.

De lift zal zichzelf resetten. U ziet hierna het getal 60 verschijnen. De tafel is weer klaar voor gebruik.

## Vervoer en verplaatsen

Let op: Zet bij transport de tafel rechtop en in de laagste stand!

## Toetsenbord

U heeft een toetsenbord met mousepad ontvangen. Controleer of deze aan staat voor u hem gebruikt.

## Servicedesk

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk: **0187665995** .

## BelevenisTafel is niet aansprakelijk voor

- Downloaden/ installeren van eigen software.
- Internet gebruik zonder toezicht.
- Schade door ruw transport.
- Oneigenlijk gebruik.
- Snoer afklemmen bij kantel en liftgebruik.

Boezemweg 14, 3255MC Oude-Tonge

+31 (0) 187 665995

verkoop@belevenistafel.nl

www.belevenistafel.nl



@Belevenistafel



/Belevenistafel



@Belevenistafel